

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом

Состав

Компоненты:

фосфорная кислота, глицерин, вода, диоксид кремния, краситель

Количественное содержание в % масс. / масс.:

37 % - фосфорная кислота

> 20 % - глицерин

< 10 % - вода

> 5 % - диоксид кремния

Назначение продукта

Гель используется для протравливания твердой субстанции зуба в рамках техники протравливания эмали.

Показания к применению

Препарат предназначен для протравливания твердой субстанции зуба в рамках техники протравливания эмали.

Противопоказания

При длительном воздействии может растворять прокладки. Не наносить на кислоторастворимые прокладки.

Характеристики

Протравливание твердой субстанции зуба и, при необходимости, прокладки.

Клиническая польза

Extra Gel представляет собой тиксотропный протравочный гель, содержащий 37% фосфорной кислоты. Удобная для использования форма выпуска в виде шприца объемом 2 мл.

Специальные меры предосторожности

При работе необходимо надевать защитные очки.

Способ применения

Подготовка шприца с протравочным гелем

Снять колпачок со шприца и вернуть канюлю. Для облегчения нанесения можно немного согнуть канюлю. Осторожно! Перед первым нанесением необходимо выдвинуть из шприца немного геля, чтобы избежать "выстреливания" большого количества геля под воздействием воздуха в шприце.

Способ применения

Нанесите протравочный гель только на эмаль, избегая попадания на дентин и края зуба. Оставьте гель для протравливания не менее чем на 15 секунд. В случае протравливания эмали "молодых" зубов, обработанных фторсодержащим лаком, время воздействия рекомендуется увеличить до 90-120 секунд. После этого протравочный гель смывается проточной водой в течение примерно 20 секунд. Обработанный участок необходимо просушить потоком воздуха, не содержащего масла и воды. Протравленная эмаль должна иметь молочно-белый цвет или цвет белой извести.

Рекомендации по применению:

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Нанесение адгезива

С помощью кисточки нанесите выбранный вами адгезив на сухую протравленную поверхность эмали. При проведении процедуры не допускать попадание слюны на эмаль. Следуйте инструкциям по применению адгезива.

Установка, отверждение и покрытие

Следуйте рекомендациям производителя по применению соответствующего материала.

Меры предосторожности

Проследите за тем, чтобы на протравленной зубной эмали не было загрязнений. В случае загрязнения поверхности эмали другими жидкостями, необходимо повторить протравку, а затем промыть эмаль проточной водой и подсушить струей воздуха, как описано выше. Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и защитные очки. Избегайте попадания протравочного геля на слизистые оболочки, в глаза и на кожу. При случайном попадании немедленно промойте проточной водой.

Возможные побочные эффекты

На сегодняшний день информация о возможных побочных эффектах отсутствует. В отдельных случаях не исключена повышенная чувствительность к компонентам препарата. Избегайте контакта пасты с кожей. При попадании на кожу немедленно промойте водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы.

Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие продукта и его метаболитов с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Срок хранения 3 года при температуре 22°C

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

[REF]WP4050 1 шприц объемом 2,0 мл + канюлю

[REF]WP4051 2 шприца объемом по 2,0 мл + канюлю

Утилизация

Не использованный материал подлежит утилизации.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49
www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



22°C
0°C



Danger
Danger

Made in Germany



H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

26.03.2024
2024-REV-013