

# Securafix<sup>®</sup>

## Инструкция по применению препарата

SecuraFix представляет собой стеклоиономерный цемент с исключительно хорошими характеристиками сцепления с эмалью и дентином. К его отличительным чертам относятся низкая растворимость и кислотность.

### Состав

Силикатный порошок, полиакриловая кислота.

### Показания к применению

Для постоянной фиксации коронок, мостов, вкладок, внутрикорневых штифтов и ортодонтических аппаратов.

### Противопоказания

Не допускать прямого контакта с пульпой.

### Способ применения

Тщательно очистить и высушить эмаль, дентин и металлические поверхности. Важно убедиться в отсутствии эвгенола, который негативно влияет на эффективность Securafix. В этой связи рекомендуется применять для временных работ цемент Пи-сем, не содержащий эвгенол.

SecuraFix применяется при комнатной температуре (15-23°). При более высокой температуре рекомендуется использовать охлажденный блок для замешивания.

Нанести порошок и жидкость на стекло или блок, и постепенно добавлять порошок в жидкость. На 1 каплю жидкости требуется 1 деление мерной ложки порошка. Время перемешивания составляет приблизительно 30 секунд. Время работы с Securafix при комнатной температуре составляет приблизительно 3 минуты, застывание во рту – около 3 минут. Более высокая температура сокращает время работы, а более низкая – увеличивает его.

Консистенция Securafix считается правильной, если его можно наносить на культю зуба и во внутрь коронки шпателем. Во время работы и затвердевания избегать контакта вещества с водой и слюной.

### Дополнительные свойства

Промывать водой инструмент немедленно после окончания работ и до того, как он окончательно затвердеет. После снятия ортодонтических аппаратов, остатки цемента можно осторожно и быстро удалить с помощью ультразвукового скалера. Закрывать упаковку с порошком сразу после использования.

SecuraFix соответствует требованиям стандарта ISO 7489.

### Форма выпуска

REF WP4110 24г порошка, 10г жидкости.

REF WP4093 7г порошка, 5г жидкости.

REF WP4146 10г жидкости