

Инструкция по применению

Целевая группа:

Дети, подростки, взрослые и пожилые люди

Предназначено для использования

врачом-стоматологом, специалистом, выполняющим процедуры по профессиональной гигиене полости рта

Состав

Компоненты:

Гидрокарбонат натрия, аморфный диоксид кремния, подсластители и ароматизаторы

Количественное содержание:

97,3 % - гидрокарбонат натрия

1 % - аморфный кремнезем

1,6 % - подсластитель

0,1 % - ароматизатор

Назначение продукта

Очистка поверхности зубов

Показания к применению

Только для очистки поверхности зубов (супрагингивальной чистки)

Противопоказания

- Процедура профессиональной гигиены полости рта с использованием порошкоструйного аппарата категорически запрещена пациентам и врачам, страдающим хроническим бронхитом или астмой. Струя воздуха, смешанного с порошком, может вызвать затруднение дыхания.
- Не использовать у пациентов с инфекциями верхних дыхательных путей.
- Не использовать у пациентов, соблюдающих низкосолевую диету, так как порошок содержит бикарбонат натрия.
- Не использовать при наличии аллергии на какой-либо из компонентов.
- Не направлять воздушную струю с порошком на пломбы, коронки или мосты, так как это может привести к повреждению реставраций.

Характеристики

Очищает поверхность зубов

Специальные меры предосторожности

- Пациент и врач должны использовать средства для защиты глаз.
- Врач, проводящий процедуру, должен надевать защитную маску и очки.
- Для максимальной защиты следует положить в ротовую полость пациента длинные ватные валики.

Способ применения

Нанесите вазелин на губы пациента. Засыпьте порошок в порошкоструйный аппарат и следуйте инструкциям производителя аппарата. Используйте большую отсасывающую канюлю стоматологической установки. Препарат может использоваться только специалистом (врачом-стоматологом).

Указание:

Запрещается превышать максимальный уровень заполнения, указанный на контейнере для порошка.

Если оставлять флакон с порошком открытым на долгое время, то возможно образование комочков, которые могут засорить аппарат.

Предостережения и меры предосторожности**Остаточные риски**

При применении препарата необходимо соблюдать рекомендации по применению и меры предосторожности, описанные в прилагаемой инструкции. В случае возникновения нежелательной реакции у пациента несмотря на соблюдение всех рекомендаций и указаний, приведенных в инструкции, просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства.

Возможные побочные эффекты

На сегодняшний день информация о возможных побочных эффектах отсутствует. При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды. Если вам стало известно о нежелательных побочных эффектах - даже в случае сомнений - просьба сообщить нам об этом, как можно точнее описав сопутствующие обстоятельства и симптомы. Случаи передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие продукта и его метаболитов с другими препаратами, лекарственными средствами или веществами неизвестно.

Условия хранения

Порошок не следует хранить вблизи кислот и источников тепла. Хранить при температуре от 0 до 22°C. Беречь от попадания влаги.

Срок годности

Не использовать после истечения срока годности.

Формы выпуска

REF WP4913 ежевика 1 x 500 г

REF WP4914 мята 1 x 500 г

REF WP4933 лимон 1 x 500 г

Утилизация

Не использованный материал подлежит утилизации в соответствии с предписаниями

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.



We know how

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48

www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de



Willmann & Pein GmbH

Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9228-0
Fax: +(49) 4123/9228-49

www.wp-dental.de
info@wp-dental.de



Made in Germany

